

PŘÍLOHA II, bod 1.4
Nariadení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS

Návod a informace výrobce

Výrobce:

THINH LONG INTERNATIONAL TRADING JOINT STOCK COMPANY

Adress: B14 – mixed use commercial center project, public service, office and housing for sale, 108 Nguyen Trai Street., Thuong Dinh Ward., Thanh Xuan District., Hanoi City, Vietnam

Zplnomocněný zástupce:

VIENMARK s.r.o., Za Tratí 192, 78813 Vikýřovice, Česká republika.

Název OPP: Filter half-mask PROMASK respirátor typ FFP2

Klasifikace OOP: Filtrační polomaska PROMASK, respirátor typu FFP2, kategorie III.

Určené použití: Osobní ochranný prostředek dýchacích orgánů k ochraně proti částicím s účinností min.95%

Oznámený subjekt: 1023- Institut pro testování a certifikaci a.s. Zlín, třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika.

Použité harmonizované normy: ČSN EN ISO 149+A1:2009 (EN ISO 149:2001+A1:2009)

Návod k použití:

+Vyjměte respirátor z obalu a zkontrolujte neporušenost respirátoru.

+Uchopte respirátor tak, aby byl ohýbatelný okraj nahoře.

+Uchopte gumičky do obou rukou a napněte za uši.

+Uchopte spodní okraj respirátoru a přetáhněte přes ústa a bradu.

Materiál: Netkaná textilie, PP spunbond-filtr. vrstva-polstrovaná vrstva-filtr. vrstva-PP spunbond.

Nosní spona: Pozinkovaný plast. Ušní gumička: Polyurethane + polyester

Skladování: Respirátory skladujte nerozbalené v teplotě od -20 °C do 30 °C, s vlhkostí nižší než 80 %.

Respirátory vždy přepravujte v neporušeném primárním a sekundárním obalu.

Čištění a dezinfekce: Čištění vodou nebo saponátem snižuje a poškozuje funkčnost respirátoru. Respirátor lze dezinfikovat po krátkém nošení pomocí UV záření.

Údržba: Před použitím zkontrolujte neporušenost balení respirátoru. Dbejte, aby části respirátoru, které přijdou do styku s nositelem, neměly žádné ostré hrany nebo otřepy. Uchovejte respirátor vždy v čistém obalu, pokud se nepoužívá.

Minimální trvanlivost: 3 roky od data výroby uvedené na obalu.

Upozornění:

+Čtete pozorně informace pro uživatele před použitím.

+Respirátor není určen pro opakované použití.

+Chraňte respirátory před poškozením a kontaminací při nesprávném zacházení.

+Vyměňte respirátor za nový, jakmile bude vlhký, nebo maximálně po uplynutí 12 hodin nepřetržitého používání.






+Po použití vyhoďte respirátor do vyhrazeného odpadu.

+ Respirátory nelze z hygienických důvodů vrátit nebo vyměnit.

Dokumenty ke stažení: www.thinhlongjsc.com

Význam označení:



	Výrobce
	Maximální relativní vlhkost při skladování
	Viz informace poskytnuté výrobcem
	Teplotní rozsah skladovacích podmínek
	Značka oznameného subjektu
LOT NO.	Číslo šarže
MFG	Datum výroby
EXP	Datum použitelnosti



V Hanoi dne 3.3.2021

On behalf of the manufacturer



Hoang Thi Cham

Chairman